



1. WANDHALTERUNG MONTIEREN:

Die Wandhalterung mit mindestens 3 Schrauben montieren oder den Klebestreifen verwenden.

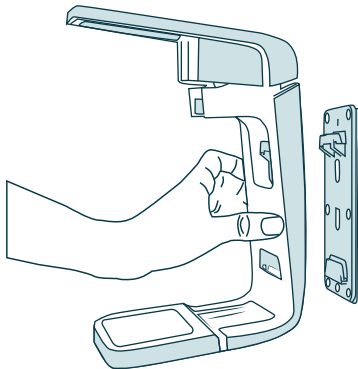

2. SPENDER ANBRINGEN:

Spender von oben auf die Wandhalterung schieben und einrasten lassen.

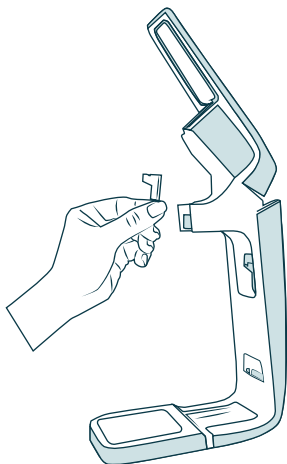


3. DOSIERMENGE EINSTELLEN:

Die Dosiermenge wird mit der Hubeinstellung (weißer Stift) eingestellt.

Je nach gewünschter Menge, den Stift in die Auslassungen unter dem Spender-Hebel stecken.

Stift vorne 1 ml / Stift hinten 2 ml

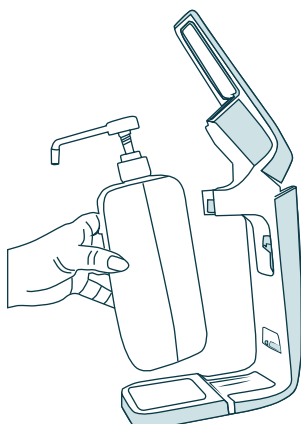

4. FÜLLMITTEL EINLEGEN

Die Spenderflasche in die Klammer drücken, bis diese sicher verankert ist.